

経済的、衛生的に潤滑剤が使える

# ゼリーアシスト K

製品カタログ



衛生的

経済的

効率的

セット  
簡単

調節  
らくらく

# ゼリーアシストK 特長

## ○ ゼリーアシストKとは\*\*\*\*\*

内視鏡検査時の潤滑剤使用をアシストする、新しいかたちの自動吐出装置です。

## ○ 特長 \*\*\*\*\*

内容量が多い使いまわしタイプの潤滑剤が衛生的に取り出せ、大幅なコスト削減効果が期待できます。

### 衛生的

非接触なので、チューブ汚染を気にすることなく潤滑剤を取り出せます。

### 経済的

検査中の血液・汚物付着による処分ゼロを可能に。大容量タイプの潤滑剤を使い切れるので経済的です。

### 効率的

潤滑剤取り出しの介助者なしを実現可能に。手の汚れを気にせず追加塗布でき、効率的です。

### セット簡単

市販の潤滑剤チューブを専用キャップに付け替える簡単なセットでご使用できます。

### 調節らくらく

3段階のダイヤルで用途に合わせた量調節が可能。ムダを防げる安心設計です。

## 使用方法

✓ 4ステップの簡単操作で、ご購入後すぐにご使用頂けます。




1 潤滑剤に専用キャップを取り付けます



2 用途に合わせて吐出量を調整します。



3 電源 ON するとランプが緑色に点灯します。

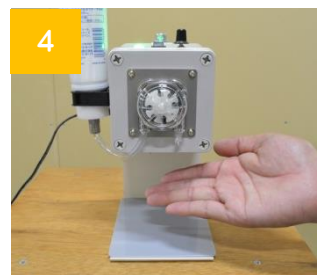

4 吐出部へ手を差し伸べ潤滑剤を受け取ります。

## 設置例

✓ 使用機器に直接設置できる省スペース設計で、検査室を圧迫することはありません。



内視鏡トロリーへ取り付けます。



2軸アームで細かな位置設定が可能です。

## 製品仕様

名 称	ゼリーアシストK	周囲条件(温度)	0℃～50℃
電 源 電 圧	DC12V(ACアダプタ)	周囲条件(湿度)	80%以下(但し結露なきこと)
消 費 電 流	300mA以下	本 体 重 量	980g
消 費 電 力	3.6W以下	吐 出 量(3段階)	多 約 2.0ml、中 約 1.2ml、少 約 0.8ml
製 品 寸 法	幅 145×奥行 150×高さ 215(mm)	主 な 材 質	本体:ABS樹脂 受皿:塩化ビニール
検 出 方 法	距離センサ	製 造	日本製
検 出 距 離	15～70mm	保 証 期 間	ご購入より一年間

※仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

※カタログ記載内容／平成 29 年 6 月

## デモンストレーションを随時承っております

デモ機持参の上、ゼリーアシストKの商品説明とデモンストレーションをさせていただきます。  
まずはお気軽にお問合せください。

TEL: 082-821-0241

E-mail: nishii@hiroshima-nishii.co.jp

ゼリーアシストK

検索

動画でも紹介中  
商品紹介ページへアクセス▶





**販売元**

**販売店**

**製造元**

株式会社西井製作所

所在地 〒736-0055 広島県安芸郡海田町南明神町1番17号

問合せ先 TEL: (082)821-0241(代) FAX: (082)821-2494

E-mail: [nishii@hiroshima-nishii.co.jp](mailto:nishii@hiroshima-nishii.co.jp)

U R L <http://www.hiroshima-nishii.co.jp>